

Mode d'emploi de chargement et de déchargement

Poignées, chargeurs et recharges SELC



1. Retirer l'emballage

Les chargeurs droits ou becqués peuvent s'utiliser sur les trois tailles de poignées. La première recharge est pré-montée sur le chargeur.




2. Charger l'agrafeuse

Repérer les flèches sur la poignée et le chargeur. Les aligner. Encliqueter. Tourner le chargeur jusqu'à entendre le « clic ».



3. Retirer la protection

Retirer la protection orange du chargeur APRÈS avoir chargé l'agrafeuse.

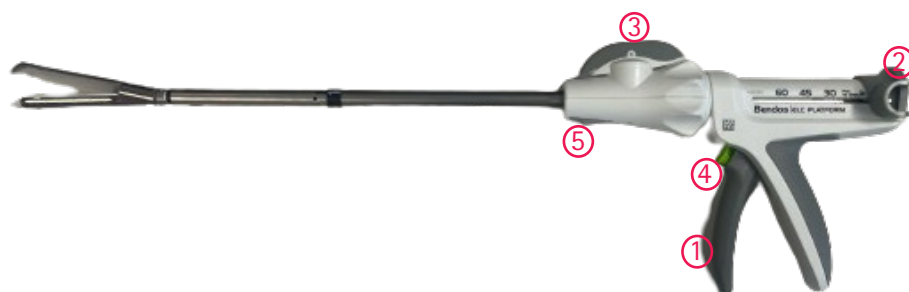

4. Actionner la poignée

S'assurer que le chargeur soit correctement monté. Pour cela, serrer la poignée (1) pour fermer les mors et tirer le levier (2) pour les ouvrir.

5. Fermer, introduire et ouvrir les mors

Fermer les mors en actionnant la poignée (1), introduire l'agrafeuse via un trocart, réouvrir les mors avec le levier (2). Ajuster l'angulation avec le levier d'articulation (3). Une fois l'agrafeuse positionnée, fermer les mors avec la poignée (1) puis la relâcher.

6. Agrafer

Enclencher l'agrafage en appuyant sur le bouton vert (4), puis agrafer en pressant lentement la poignée (1) autant de fois que nécessaire jusqu'à sentir la résistance de la pince et contrôler visuellement l'avancée du levier (2).




7. Ouvrir les mors

Ouvrir les mors avec le levier d'ouverture (2).




8. Recharger jusqu'à 6 fois

Retirer la recharge à l'aide du Take It Easy et remplacer une nouvelle recharge.

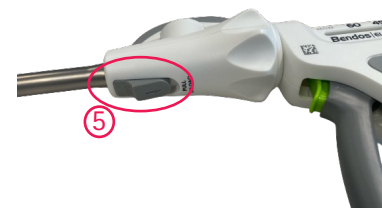

9. Possibilité de changer le chargeur

Après avoir utilisé 7 recharges ou pour utiliser une taille différente, ouvrir les mors en tirant le levier d'ouverture (2) en butée. Faire glisser le bouton coulissant (5). Tourner le chargeur d'un quart de tour. Il est expulsé automatiquement.

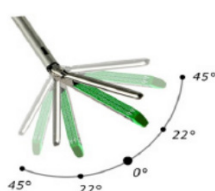

Chargeur articulé à 3 niveaux : 15°, 30° et 45°



Pointe becquée



Pointe droite

