

Lavage manuel et précautions d'entretien des

1. Nettoyage

Démonter les différents éléments. Brosser les éléments mobiles avec une brosse à poils souples. Ecouillonner le moteur et les mandrins.

Répéter ces 3 étapes si nécessaire

2. Rinçage

Rincer sous l'eau courante pendant au minimum 1 min pour retirer toutes traces de résidus opératoires.

3. Pré-désinfection

Désinfecter les moteurs et mandrins à l'aide d'un tissu non pelucheux imbibé d'une solution détergente désinfectante. (produit alcalin doux 7<pH<11)

Conditionnement

Positionner le moteur et ses accessoires sur les systèmes de support ECCOS adéquats.

2

Désinfection

Pré-désinfection



Gammes Accula

NE PAS IMMERGER LES MOTEURS ET LES MANDRINS



LES BATTERIES NE SONT AUTOCLAVABLES !

Stérilisation à la vapeur

1

Conditionnement


Positionner le moteur et ses accessoires sur les systèmes de support ECCOS adéquats.

Ces fixations permettent le calage du matériel, mais aussi l'inclinaison des moteurs pour éviter la stagnation de tout liquide dans le dispositif.

Stérilisation

134°C

18 MINUTES*

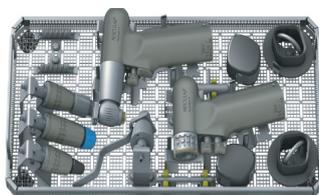


Stockage

Stocker les produits stérilisés dans une pièce de T° homogène, sèche et propre.

4

Nettoyage manuel avec désinfection par essuyage

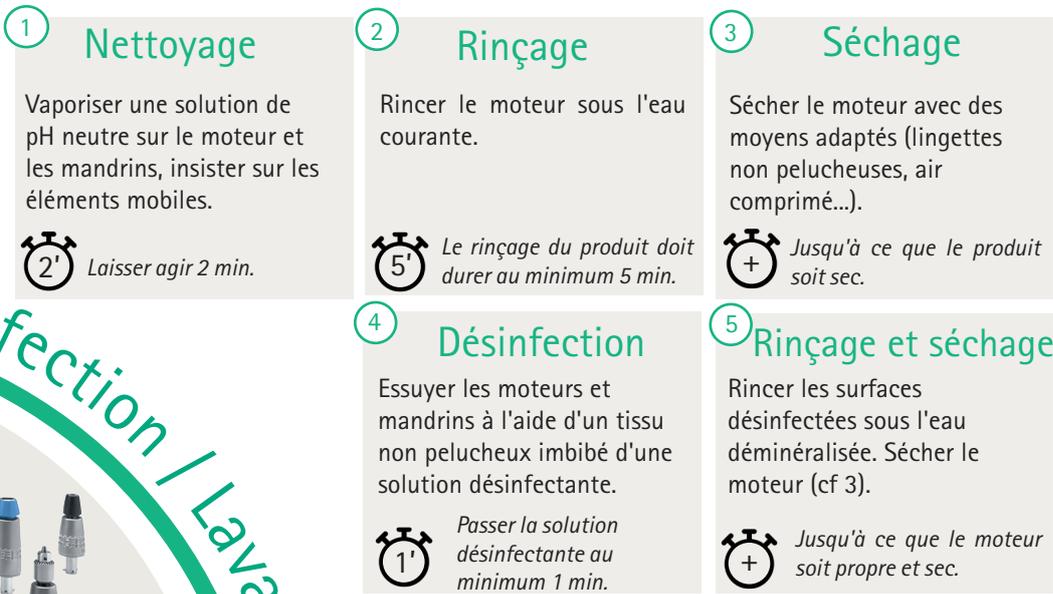

1 Nettoyage
Vaporiser une solution de pH neutre sur le moteur et les mandrins, insister sur les éléments mobiles.
2' Laisser agir 2 min.

2 Rinçage
Rincer le moteur sous l'eau courante.
5' Le rinçage du produit doit durer au minimum 5 min.

3 Séchage
Sécher le moteur avec des moyens adaptés (lingettes non pelucheuses, air comprimé...).
+ Jusqu'à ce que le produit soit sec.

4 Désinfection
Essuyer les moteurs et mandrins à l'aide d'un tissu non pelucheux imbibé d'une solution désinfectante.
1' Passer la solution désinfectante au minimum 1 min.

5 Rinçage et séchage
Rincer les surfaces désinfectées sous l'eau déminéralisée. Sécher le moteur (cf 3).
+ Jusqu'à ce que le moteur soit propre et sec.

Vérification

Après chaque nettoyage, contrôler l'absence d'humidité, de détérioration, et la propreté des moteurs.

Lubrifier les moteurs et les mandrins après chaque cycle de nettoyage

La lubrification améliore la longévité des engrenages et évite le grippage interne des moteurs et des mandrins.

Accessoires

Les adaptateurs permettent une diffusion homogène de l'huile dans le mécanisme des moteurs.

Sterilit huile de lubrification



GB600840
Grands moteurs



GB600880
Gamme XS



GB600 - Spray

Manipulation

1 Pulvériser l'huile à l'aide de l'adaptateur, et du spray d'huile Sterilit GB600 pendant 2 secondes minimum en maintenant la bouteille

2 L'huile passée au contact des rouages du moteur doit ressortir claire. Dans le cas contraire répéter l'étape de lavage.

3 Lubrifier les parties mobiles et les actionner.

4 Absorber l'excès d'huile avec de la cellulose ou un tissu non pelucheux.

Les moteurs Acculan® 4 sont destinés à la chirurgie orthopédique, traumatologique, cardiothoracique et dermatologique. Le type d'application et le domaine d'application dépendent de l'outil choisi.

Risques résiduels/effets secondaires : Risque d'infection et de contamination, risque de blessure lorsque l'Acculan est chaud, risque d'endommagement ou de détérioration irrémédiable de l'Acculan en cas de traitement stérile. Pour les autres risques résiduels, consulter la notice.

Dispositifs médicaux de classe IIa et I (chargeur et accumulateurs). Produits non pris en charge au titre de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale).

Certificat CE délivré par le TÜV SUD (CE 0123). Ce document ne remplace pas la notice d'utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l'étiquetage avant utilisation.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels.

302110P_20241114_20291114