

BON USAGE – STÉRILISATION

Conteneurs de stérilisation B. Braun Aesculap AICON®

Positionnement couvercle



- Emboîter les 4 coins du joint sur la cuve.
- *Astuce* : Débuter par un coin, puis emboîter le coin opposé.

Fermeture



- Vérifier les 4 accroches du couvercle (2 par fermeture).
- Chaque accroche doit maintenir la cuve.

Plomb



- S'assurer que les 4 accroches maintiennent la cuve
- Positionner les 2 plombs.
- *Astuce* : vous devez sentir l'encliquetage lors de leur fermeture.

Manipulation



- Pour porter les conteneurs AICON, faire une « pince » avec votre main. Mettre vos doigts dans la poignée intégrée et votre pouce sur le couvercle.
- Porter le conteneur proche de votre corps, afin de réduire la contrainte sur la colonne vertébrale.