

BON USAGE – BLOC OPÉRATOIRE

Conteneurs de stérilisation B. Braun Aesculap AICON®

MANIPULATION

- Pour porter les conteneurs AICON, faire une « pince » avec votre main. Mettre vos doigts dans la poignée intégrée et votre pouce sur le couvercle.




- Porter le conteneur proche de votre corps, afin de réduire la contrainte sur la colonne vertébrale.

CONTRÔLE DE L'INTÉGRITÉ STÉRILE

VERIFIER avant ouverture

1. La présence du filtre


Sur-couvercle transparent

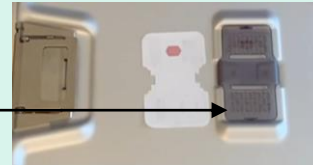

2. Les 4 accroches du couvercle maintiennent la cuve.



3. La présence des deux plombs en position verrouillée.

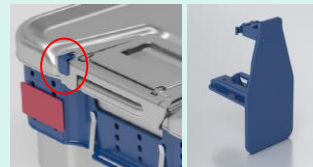

4. Le changement de couleur du témoin de passage.



OUVRIR

- Casser les plombs en ouvrant le conteneur à l'aide du système d'ouverture.



CONTRÔLER

- L'intégrité du filtre (pas de perforation)

Astuce : Pour remettre le porte-filtre, tenir le porte-filtre par la partie centrale et l'encliqueter à l'aide de la paume de la main.

Partie centrale du porte-filtre

